



NEKA VAM ZDRAVLJE
BUDE NA PRVOM MJESTU

Ortopedska obuća po mjeri



⚠️ Napomena:
Molimo Vas da ne koristite proizvod ukoliko je oštećen.



⚠️ Upozorenje: Kod stalne uporabe proizvoda može doći do iritacije osjetljive kože. Proizvod je namijenjen višekratnoj uporabi od strane jednog korisnika. Molimo Vas da ne koristite proizvod ukoliko je oštećen. Molimo Vas da prije uporabe pažljivo i temeljito pročitate upute za uporabu. Upute za uporabu sačuvajte radi buduće primjene. Molimo Vas da proizvod koristite samo u dodiru s neoštećenom i/ili zaštićenom kožom tijela. Kožna obuća te unutarnji dijelovi cipela mogu u određenoj mjeri puštati boje. Korišteni materijali testirani su na postojanost obojenja, ali pod utjecajem znoja može dolaziti do puštanja boje. Neravnomjerni izgled površine karakterističan je za prirodne kože, a ne smatra se defektom proizvoda.

Primjena: Ortopedske cipele namijenjene su osobama s poteškoćama i bolovima pri hodu, deformacijama stopala, skraćenjima noge, amputacijama dijela ili cijelog stopala, pomažu u liječenju i prevenciji boli u stopalu, nozi, gležnjevima i drugim dijelovima sustava za kretanje. Nošenjem ortopedске obuće smanjuje se ili u potpunosti otklanaju poteškoće pri kretanju i bolovi.

Izvedba: Ortopedske cipele mogu biti izvedene u svim varijantama koje nudi OTOS katalog obuće. U katalogu obuće, ponuđeni su modeli u varijantama različitih načina zatvaranja (vezice, čičak, šnala ili guma) i rezanog ili gotovog đona, po potrebama i željama kupca. Materijal izrade kupac izabire iz OTOS kataloga uzorka obuće. Moguće je izraditi cipele po slici ili uzorku kojega kupac pošalje. Također, ostale komponente cipele kao što su unutarnja pojačanja, peta (oblik i visina), ulošci i slično biraju se prema potrebama specifičnog stanja kupca i/ili naloga liječnika.

Osobine: Ortopedska obuća sadrži uložak s ortopedsko-tehničkim elementima za rasterećenje stopala, na zahtjev moguća ugradnja i CNC uloška po individualnoj baropodometrijskoj analizi. Moguća izvedba s mekanom kragnom radi ugodnije primjene. Na određenim modelima moguća je izrada dijela gornjišta od rastezljivog tekstila radi ublažavanja pritiska obuće na bolna mjesta, što je potrebno navesti pri naručivanju obuće.

Upute za uporabu: Po početku korištenja ortopedskih cipela, važno je dozvoliti određen period nošenja kako bi se stopalo naviknulo. Za što dugotrajnije i ugodnije korištenje, važno je pridržavati se uputa za održavanje proizvoda i upozorenja koje je izdao proizvođač obuće.

Datum izdavanja uputa za uporabu: 10.05.2021.

Održavanje proizvoda: Kako bi cipele bile što dugotrajnije, potrebno ih je pravilno održavati. Pri održavanju obuće presudnu ulogu ima materijal od kojeg je napravljena, pa tome treba prilagoditi sredstva za održavanje.

Na Vašim cipelama je postavljena naljepnica s informacijama o materijalu od kojega su cipele izrađene.

Pojašnjenje simbola piktograma:



Tekstil



Koža
korigiranog lica



Koža



Ostali materijali



Gornjište



Podstava i
uložna tabanica



Potplat
(donjište)

Ovisno o vrsti kože od koje je izrađeno Vaše gornjište, potrebno je prilagoditi održavanje:

• **Glatka koža**

Obuću od glatke kože potrebno je očistiti četkom, spužvom ili krpom kako bi se uklonili ostatci stare kreme za obuću. Četkom od prave dlake nanijeti malo kreme za čišćenje i ostaviti da se upije i osuši, te potom iščetkati.

• **Nubuk**

Suhu obuću očistiti četkom za čišćenje nubuka, za tvrdokornije nečistoće upotrijebiti meku guminicu za brisanje. Poželjno je prije prvog nošenja kožu impregnirati sprejem i ostaviti da se osuši.

• **Velur**

Kako bi se očuvalo puhati izgled materijala, potrebno ga je čistiti četkom za čišćenje velura. Mrlje skinuti guminicom za velur u kamenu. Raspršivačem osvježiti boje i zaštititi cipele od vode.

Nakon svake uporabe pustiti cipele da se osuše i prozrače. Mokru i vlažnu obuću sušiti na sobnoj temperaturi. Držati podalje od direktnih izvora topline. Ne potapati u vodi. Štititi metalne dijelove od prevelikog izlaganja vlazi. Ne prati strojno.

Ukoliko se bavite sportom, a Vaše cipele nisu izrađene posebno za tu namjenu, molimo Vas da cipele skinete prije sportskih aktivnosti.

Zbrinjavanje proizvoda: Molimo Vas da proizvod i ambalažu zbrinete na primjeren način. Nemojte proizvod bacati u okoliš.



 **Proizvođač:**
OTOS Ortopedska tehnika d.o.o.

Vukovarska 1, 31000 Osijek

Hrvatska, EU

tel.: +385 31 252 000

faks: +385 31 252 004

e-pošta: otos@otos.hr

web: www.otos.hr

Besplatni info telefon: 0800 94 20



Osijek

[Vukovarska 1, 031/252-000](http://www.otos.hr)

Zagreb

[Vinogradска 11, 01/370-15-84](http://www.otos.hr)

Sesvete

[Ninska 22a, 01/488-33-00](http://www.otos.hr)

Vinkovci

[Hrvatskih žrtava 19a, 032/331-085](http://www.otos.hr)

Slavonski Brod

[Tome Bakača 1, 035/445-157](http://www.otos.hr)

Virovitica

[Ljudevita Gaja 20, 033/800-301](http://www.otos.hr)

info@otos.hr • www.otos.hr