

Ortoze za potporu ekstremiteta



MEDICINSKI PROIZVOD



⚠️ UPOZORENJE:

Prije uporabe molimo Vas detaljno pročitajte upute za uporabu.

Vijek uporabe:

5 godina od datuma proizvodnje (označen na deklaraciji) ili godinu dana od početka primjene proizvoda.

⚠️ Napomena:

Molimo Vas da ne koristite proizvod ukoliko je oštećen.



MD

CE

Medicinski proizvod klase rizika I izrađen po mjeri.
Svaki ozbiljan štetni događaj do kojega je došlo u vezi s proizvodom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice EU.

Upozorenje:

- Nakon postavljanja proizvoda, uvijek provjeriti da je proizvod pravilno i sigurno postavljen sukladno uputama za uporabu.
- Prije svakog stavljanja ortoze na tijelo provjeriti postojanje oštih rubova plastike ili postojanje nekih metalnih oštih dijelova koji bi mogli nanijeti bilo kakvu ozljeđu.
- Ortozu uvijek treba dobro pričvrstiti na tijelo kako bi ispunila svoju namjenu.
- Kod stalne uporabe proizvoda može doći do iritacije osjetljive kože.
- Proizvod je namijenjen višekratnoj uporabi od strane jednog korisnika.
- Molimo Vas da ne koristite proizvod ukoliko je oštećen.
- Molimo Vas da prije uporabe pažljivo i temeljito pročitate upute za uporabu. Upute za uporabu sačuvajte radi buduće primjene.
- Molimo Vas da proizvod koristite samo u dodiru s neoštećenom i/ili zaštićenom kožom tijela.
- Ukoliko se javljaju nedopuštena crvenila, podljevi ili bilo kakvi nedopušteni natići javiti se što prije svom ortotičaru kako bi se problem otklonio.
- Ne izlagati direktnim izvorima topline.
- Ukoliko proizvod sadrži metalne dijelove voditi brigu o njihovom stanju. Na sumnju u neispravnost odmah se javiti proizvođaču.



Upozorenje: U slučaju pojave bilo kakve nelagode, iritacije ili boli u vezi s nošenjem ortoze, odmah prekinite uporabu ortoze i javite se Vašem ortotičaru.

Postavljanje ortoze

Prije svakog stavljanja ortoze na tijelo provjeriti postojanje oštih rubova plastike ili postojanje nekih metalnih oštih dijelova koji bi mogli nanijeti bilo kakvu ozljeđu.

Postavite ekstremitet u ortozu i pričvrstite čičak trakama. Ortozu uvijek treba dobro pričvrstiti na tijelo kako bi ispunila svoju namjenu.

Nakon postavljanja proizvoda, uvijek provjeriti da je proizvod pravilno i sigurno postavljen

Njega ekstremiteta i čišćenje ortoze

Važno je svakodnevno njegovati ekstremitet na kojem se nosi ortoza. Pranjem blagim sapunom možete sprječiti probleme s kožom. Za moguće probleme s kožom (tvrdna koža, gljivice, znojenje kože...) postoji cijela lepeza kozmetičkih proizvoda. O svim problemima sa kožom ekstremiteta posavjetujte se sa Vašim liječnikom i ortopedskim tehničarom.

Ortozu također treba prebrisavati svaki dan nakon nošenja jer se znojenjem i samim nošenjem ortoze nakupljaju bakterije koje bi dugoročno mogle imati posljedice na probleme s kožom. Ortozu prebrisite čistom i vlažnom krpom. Sušite ortozu podalje od direktnih izvora topline.

Promjene volumena ekstremiteta

Manje promjene volumena ekstremiteta tijekom dana normalne su. Ukoliko Vam je ekstremitet otekao do te mjere da primjena ortoze uzrokuje nelagodu, skinite ortozu i prekinite s uporabom do smanjenja otoka. Ukoliko se stanje produlji, obratite se Vašem liječniku ili ortopedskom tehničaru.

Dodatne mjere predostrožnosti

Ovisno o Vašim indikacijama, mogu se u pojedinačnim slučajevima javiti komplikacije u opskrbni ortozom. Tada se ortoze može koristiti u ograničenom opsegu. Kod bilo kakvih tehničkih problema s ortozom, obratite se za pomoć vašoj ortopedsko-tehničkoj radionici.

Prije svakog korištenja provjerite ortozu – svi dijelovi moraju biti u funkciji i neoštećeni. Materijali koji su korišteni u izradi Vaše ortoze odabiru se s puno pozornosti. Ako se pojave promjene na koži ekstremiteta, što prije se obratite Vašem liječniku. Ako se unatoč pravilnom rukovanju javi problemi s ortozom, za pomoć se obratite u Vašu ortopedsko-tehničku radionicu.

Zbrinjavanje proizvoda

Molimo Vas da proizvod zbrinete na primjeren način sukladno dijelovima.

Datum izdavanja uputa za uporabu: 10.05.2021.



Proizvođač:
OTOS Ortopedska tehnika d.o.o.

Vukovarska 1, 31000 Osijek
Hrvatska, EU
tel.: +385 31 252 000
faks: +385 31 252 004
e-pošta: otos@otos.hr
web: www.otos.hr
Besplatni info telefon: 0800 94 20

ORTOTIČKA RADIONICA
tel.: **+385 31 252 005**



Osijek

[Vukovarska 1, 031/252-000](http://www.otos.hr)

Zagreb

[Vinogradска 11, 01/370-15-84](http://www.otos.hr)

Sesvete

[Ninska 22a, 01/488-33-00](http://www.otos.hr)

Vinkovci

[Hrvatskih žrtava 19a, 032/331-085](http://www.otos.hr)

Slavonski Brod

[Tome Bakača 1, 035/445-157](http://www.otos.hr)

Virovitica

[Ljudevita Gaja 20, 033/800-301](http://www.otos.hr)

info@otos.hr • www.otos.hr