

Jastuk za invalidska kolica



MEDICINSKI PROIZVOD

⚠ UPOZORENJE:

Prije uporabe molimo Vas detaljno pročitajte upute za uporabu.

Vijek uporabe:

5 godina od datuma proizvodnje (označen na deklaraciji) ili godinu dana od početka primjene proizvoda.

⚠ Napomena:

Molimo Vas da ne koristite proizvod ukoliko je oštećen.



Medicinski proizvod klase rizika I. Svaki ozbiljan štetni događaj do kojega je došlo u vezi s proizvodom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice EU.

Upozorenje:

- Proizvod je namijenjen višekratnoj uporabi od strane jednog korisnika.
- Molimo Vas da ne koristite proizvod ukoliko je oštećen.
- Molimo Vas da prije uporabe pažljivo i temeljito pročitate upute za uporabu. Upute za uporabu sačuvajte radi buduće primjene.

Primjena:

- Za ugodniju uporabu invalidskih kolica.

Izvedbe:

- U različitim veličinama: 38x38x5cm, 40x40x5cm, 42x42x5cm, 44x42x5cm, 44x44x5cm, 46x42x5cm, 46x46x5cm, 48x42x5cm, 48x48x5cm.

Osobine:

- Jednostavno postavljanje.
- Pričvršćivanje na kolica uz pomoć trake.
- Maksimalno opterećenje 120 kg.

Sastav proizvoda:

punjenje: 100% poliuretan; presvlaka: tkanina 100 % poliamid, membrana poliuretan, spužva: poliuretan.

Rok uporabe:

5 godina od datuma proizvodnje (označen na deklaraciji) ili godinu dana od početka primjene proizvoda.

Upute za uporabu:

- Otkopčajte čičak traku.
- Postavite jastuk na sjedište invalidskih kolica tako da su čičak trake s donje strane jastuka, a s prednje i stražnje strane sjedišta invalidskih kolica.
- Provucite trake ispod sjedišta invalidskih kolica i zakopčajte pomoću čičak traka.
- Prije uporabe, uvjerite se da je jastuk čvrsto i sigurno postavljen.

Datum izdavanja uputa za uporabu: 31.03.2021.

Održavanje proizvoda:

- Pranje nije dopušteno. Po potrebi prozračiti jastuk na svježem zraku. Navlaka se može ručno prati na 30°C.
- Glačanje nije dopušteno.
- Kemijsko čišćenje nije dopušteno.
- Strojno sušenje nije dopušteno.
- Sušiti okomito.

Zbrinjavanje proizvoda:

Molimo Vas da proizvod zbrinete na primjeren način za tekstilne proizvode.

Zbrinjavanje ambalaže:

Molimo Vas da ambalažu zbrinete na primjeren način s obzirom na vrstu ambalaže.



Proizvođač:
OTOS Ortopedska tehnika d.o.o.

Vukovarska 1, 31000 Osijek
Hrvatska, EU

SRN: HR-MF-000040944

tel.: +385 31 252 000

faks: +385 31 252 004

e-pošta: info@otos.hr

web: www.otos.hr

Besplatni info telefon: **0800 94 20**