

Korektivne ortoze za kralježnicu



MEDICINSKI PROIZVOD



UPOZORENJE:

Prije uporabe molimo Vas detaljno pročitajte upute za uporabu.



Napomena:

Molimo Vas da ne koristite proizvod ukoliko je oštećen.



Medicinski proizvod klase rizika I izrađen po mjeri. Svaki ozbiljan štetni događaj do kojega je došlo u vezi s proizvodom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice EU.

Upozorenje:

- Nakon postavljanja proizvoda, uvijek provjeriti da je proizvod pravilno i sigurno postavljen sukladno uputama za uporabu.
- Prije svakog stavljanja ortoze na tijelo provjeriti postojanje oštrih rubova plastike ili postojanje nekih metalnih oštrih dijelova koji bi mogli nanijeti bilo kakvu ozljedu.
- Kod stalne uporabe proizvoda može doći do iritacije osjetljive kože. Proizvod redovito čistiti i dezinficirati kako ne bi došlo do iritacije kože. Uvijek nositi zaštitnu majicu ispod ortoze.
- Molimo Vas da proizvod koristite samo u dodiru s neoštećenom i/ili zaštićenom kožom tijela.
- Proizvod je namijenjen višekratnoj uporabi od strane jednog korisnika i taj korisnik je imenom i prezimenom naveden na naslovnici ovih uputa za uporabu.
- Molimo Vas da ne koristite proizvod ukoliko je oštećen.
- Molimo Vas da prije uporabe pažljivo i temeljito pročitate upute za uporabu. Upute za uporabu sačuvajte radi buduće primjene.
- Ukoliko se javljaju nedopuštena crvenila, podljevi ili bilo kakvi nedopušteni natisci javiti se što prije svom ortotičaru kako bi se problem otklonio.
- Ne izlagati direktnim izvorima topline.
- Ukoliko proizvod sadrži metalne dijelove voditi brigu o njihovom stanju. Na sumnju u neispravnost odmah se javiti proizvođaču.



Upozorenje: U slučaju pojave bilo kakve nelagode, iritacije ili boli u vezi s nošenjem ortoze, odmah prekinite uporabu ortoze i javite se Vašem ortotičaru.

Primjena

Kako biste očuvali funkcionalnost i sigurnost ortoze, važno je pažljivo rukovanje, stoga Vas molimo da temeljito i pažljivo proučite ove upute za uporabu, te da ih sačuvate kako biste ih mogli ponovno proučiti u slučaju nedoumica.

Kod prve opskrbe ortozom, u suradnji sa svojim ortotičarom, trebate uvježbati oblačenje i skidanje, sjedenje, stajanje, kretanje sa ortozom. Sve savjete možete dobiti kod liječnika i/ili ortotičkog tehničara.

Postavljanje ortoze

Prije svakog korištenja provjerite ortozu – svi dijelovi moraju biti u funkciji i neoštećeni. Ortozu obucite kako ste naučili u ortopedsko-tehničkoj radionici, tako da ona dobro „sjedne“ na tijelo. Provjerite da ne priklješćite kožu na rub ortoze pri oblačenju.

Čišćenje ortoze

Ortoze su izrađene od materijala koje podnose čišćenje blagim rastvorom vode i sredstva za pranje, deterdenta. Preporuka je jednom tjedno prebrisati ortozu s nutarnje i vanjske stvarne kako bi se uklonile nečistoće nakupljene svakodnevnim korištenjem. Nije preporučljivo ortozu dugotrajno izlagati povećanoj vlažnosti jer može doći do korozije na prisutnim metalnim dijelovima ortoze.

Dodatne mjere opreza

Bavljenje sportom sa ortozom se NE preporučuje! Prije bilo kakvih sportskih aktivnosti skinuti ortozu. Treba izbjegavati nošenje ortoze u vodi, slanoj vodi te kontakte s kiselinama, lužinama i otapalima. Zagrijavanje ortoze iznad 40°C (npr. u sauni, kod dugog izlaganja suncu ili kod sušenja na peći) treba izbjegavati jer to može dovesti do deformacija ortoze i promjene sastavnih dijelova.

 **Upozorenje:** Sušiti podalje od direktnih izvora topline.

Metalni dijelovi na površini proteze trebaju biti zaštićeni od pretjeranog izlaganja vlazi.

Pozor! Nemojte čistiti ortozu jakim sredstvima za čišćenje ili razrjeđivačima. Na taj način možete oštetiti površinu ili spojeve nastale lijepljenjem.

Zbrinjavanje proizvoda

Molimo Vas da proizvod zbrinete na primjeren način sukladno dijelovima.

Datum izdavanja uputa za uporabu: 10.05.2021.

ORTOTIČKA RADIONICA
tel.: +385 31 252 005

OTOS
ORTOPEDSKA TEHNIKA

 **Proizvođač:**
OTOS Ortopedska tehnika d.o.o.

Vukovarska 1, 31000 Osijek
Hrvatska, EU

SRN: HR-MF-000040944

tel.: +385 31 252 000

faks: +385 31 252 004

e-pošta: info@otos.hr

web: www.otos.hr

Besplatni info telefon: **0800 94 20**