

Ortopedski ulošci UniRelax

MEDICINSKI PROIZVOD



⚠ UPOZORENJE:

Prije uporabe molimo Vas detaljno pročitajte upute za uporabu.

Vijek uporabe:

5 godina od datuma proizvodnje (označen na deklaraciji) ili godinu dana od početka primjene proizvoda.

⚠ Napomena:

Molimo Vas da ne koristite proizvod ukoliko je oštećen.



Medicinski proizvod klase rizika I. Svaki ozbiljan štetni događaj do kojega je došlo u vezi s proizvodom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice EU.

Upozorenje:

- Proizvod je namijenjen višekratnoj uporabi od strane jednog korisnika.
- Molimo Vas da ne koristite proizvod ukoliko je oštećen.
- Molimo Vas da prije uporabe pažljivo i temeljito pročitate upute za uporabu. Upute za uporabu sačuvajte radi buduće primjene.
- Molimo Vas da proizvod koristite samo u dodiru s neoštećenom i/ili zaštićenom kožom tijela.

Primjena:

- za umorna stopala
- za ublažavanje boli u stopalima
- za rasterećenje pritiska u stopalu
- za potporu uzdužnog i/ili poprečnog svoda stopala
- po preporuci liječnika

Primjena uložaka sa supinacijskim klinom:

- za korekciju položaja pete

Kontraindikacije:

- značajniji deformiteti stopala
- Diabetes Mellitus
- bavljenje sportom
- rane na mjestu primjene
- ozljeda stopala

Izvedbe:

- ortopedski uložak Uni Relax
- ortopedski uložak Uni Relax sa supinacijskim klinom

VELIČINA	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
DUŽINA ULOŠKA (cm)	13,2	13,8	14,5	15,2	16	16,5	17,2	18	18,5	19,3	20	20,5	21,2

VELIČINA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
DUŽINA ULOŠKA (cm)	22	22,5	23,2	24	24,5	25,2	26	26,5	27,2	28	28,5	29,2	30	30,5

Napomena: zbog načina izrade, moguće je odstupanje +/- 3mm

Osobine:

- Izuzetno tanki.
- Izrađeni pretežno od prirodnih materijala.
- Lako se održavaju.

Sastav proizvoda:

Uni relax: tabanica boks cjepanik, ortopedsko-tehnički elementi od kaučuka, podstava poliester

Uni relax sa supinacijskim klinom: tabanica boks cjepanik, ortopedsko-tehnički elementi od kaučuka, pluto, podstava poliester

Vijek uporabe: 5 godina od datuma proizvodnje (označen na deklaraciji) ili godinu dana od početka primjene proizvoda.

Upute za uporabu:

Tijekom prvih tjedana uporabe ortopedskih uložaka, možete osjetiti nelagodu ako dosada niste koristili ortopedske uloške. Vašem tijelu i Vašim stopalima treba vremena da se naviknete na uloške. Tijekom prvog tjedna, postepeno se navikavajte na ortopedske uloške. Prvi dan ih nosite nekoliko sati, a svaki idući dan pokoji sat duže. Drugi tjedan pokušajte nositi uloške što je više moguće tijekom dana, svakoga dana.

Ortopedski ulošci pomažu poravnanju cijelog tijela, stoga preporučamo kontinuiranu uporabu tijekom cijelog dana nakon inicijalne faze prilagodbe. Ako mijenjate obuću, prebacite Vaše ortopedske uloške u drugu obuću. Uklanjanje tvorničkog uloška na obući bi Vam moglo pomoći u tome, no za to se konzultirajte s proizvođačem i/ili prodavačem Vaše obuće.

Održavanje proizvoda:



- Pranje nije dopušteno.
- Glačanje nije dopušteno.
- Kemijsko čišćenje nije dopušteno.
- Strojno sušenje nije dopušteno.
- Prebrisati vlažnom krpom i temeljito posušiti podalje od izvora topline.

Zbrinjavanje proizvoda:

- Molimo Vas da proizvod zbrinete na primjeren način za kožne proizvode.

Zbrinjavanje ambalaže:

- Molimo Vas da ambalažu zbrinete na primjeren način za papirnatu ambalažu.



Datum izdavanja uputa za uporabu: 10.05.2021.

OTOS
ORTOPEDSKA TEHNIKA

Proizvođač:
OTOS Ortopedska tehnika d.o.o.

Vukovarska 1, 31000 Osijek
Hrvatska, EU

SRN: HR-MF-000040944

tel.: +385 31 252 000

faks: +385 31 252 004

e-pošta: info@otos.hr

web: www.otos.hr

Besplatni info telefon: **0800 94 20**