

Ortoza za Digitus Superductus



MEDICINSKI PROIZVOD

⚠ UPOZORENJE:

Prije uporabe molimo Vas detaljno pročitajte upute za uporabu.

Vijek uporabe:

5 godina od datuma proizvodnje (označen na deklaraciji) ili godinu dana od početka primjene proizvoda.

⚠ Napomena:

Molimo Vas da ne koristite proizvod ukoliko je oštećen.



Medicinski proizvod klase rizika I. Svaki ozbiljan štetni događaj do kojega je došlo u vezi s proizvodom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice EU.

⚠ Upozorenje:

- Kod stalne uporabe proizvoda može doći do iritacije osjetljive kože.
- Proizvod je namijenjen višekratnoj uporabi od strane jednog korisnika.
- Molimo Vas da ne koristite proizvod ukoliko je oštećen.
- Molimo Vas da prije uporabe pažljivo i temeljito pročitate upute za uporabu. Upute za uporabu sačuvajte radi buduće primjene.
- Molimo Vas da proizvod koristite samo u dodiru s neoštećenom i/ili zaštićenom kožom tijela.

Indikacije:

- Digitus Superductus

Izvedbe:

- za odrasle
- za djecu

Osobine:

- Lako se postavlja.
- Ugodna za uporabu.
- Lako se održava.
- Optimalna mogućnost prilagodbe čičak trakom.

Sastav proizvoda: osnovni materijal: 74,3% poliester, 25,7% gumene niti; čičak traka: 100% poliamid.

Tablica veličina:

Za odrasle	Veličina	Konf. broj obuće	Dječja	Veličina	Konf. broj obuće
	XS	35-36		1	16-18
	S	36-37		2	19-21
	M	38-39		3	22-24
	L	40-41		4	25-27
	XL	42-43		5	29-31
XXL	44-45	6	31-34		

Vijek uporabe:

5 godina od datuma proizvodnje (označen na deklaraciji) ili godinu dana od početka primjene proizvoda.

POSTAVLJANJE ORTOZE NA PRST KOJI IDE IZNAD DRUGIH PRSTIJU

1. Postavite omču prema dolje.



2. Postavite omču na željeni prst.



3. Ukrižite trake ispod prsta.



4. Povucite trake prema sredini stopala i prema gore.



5. Ukrižite trake na ristu.



6. Zakopčajte čičak trake iznad pete.



POSTAVLJANJE ORTOZE NA PRST KOJI IDE ISPOD DRUGIH PRSTIJU

1. Postavite omču prema gore.



2. Postavite omču na željeni prst.



3. Ukrižite trake iznad prsta.



4. Povucite trake prema sredini stopala i prema dolje.



5. Ukrižite trake ispod stopala.



6. Zakopčajte čičak trake iznad pete.



Održavanje proizvoda:



- Dozvoljeno strojno pranje (vrlo blagi postupak) na temperaturi do 40°C.
- Glačanje nije dopušteno.
- Kemijsko čišćenje nije dopušteno.
- Strojno sušenje nije dopušteno.
- Sušiti okomito.

Zbrinjavanje proizvoda:

- Molimo Vas da proizvod zbrinete na primjeren način za tekstilne proizvode.

Zbrinjavanje ambalaže:

- Molimo Vas da ambalažu zbrinete na primjeren način s obzirom na vrstu ambalaže.

Datum izdavanja uputa za uporabu: 15.04.2021.



Proizvođač:
OTOS Ortopedska tehnika d.o.o.
Vukovarska 1, 31000 Osijek
Hrvatska, EU
SRN: HR-MF-000040944
tel.: +385 31 252 000
faks: +385 31 252 004
e-pošta: info@otos.hr
web: www.otos.hr
Besplatni info telefon: **0800 94 20**