

## Ortoza za Hallux Valgus



MEDICINSKI PROIZVOD

**⚠ UPOZORENJE:**

Prije uporabe molimo Vas detaljno pročitajte upute za uporabu.

**Vijek uporabe:**

5 godina od datuma proizvodnje (označen na deklaraciji) ili godinu dana od početka primjene proizvoda.

**⚠ Napomena:**

Molimo Vas da ne koristite proizvod ukoliko je oštećen.



Medicinski proizvod klase rizika I. Svaki ozbiljan štetni događaj do kojega je došlo u vezi s proizvodom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice EU.

### ⚠ Upozorenje:

- Kod stalne uporabe proizvoda može doći do iritacije osjetljive kože.
- Proizvod je namijenjen višekratnoj uporabi od strane jednog korisnika.
- Molimo Vas da ne koristite proizvod ukoliko je oštećen.
- Molimo Vas da prije uporabe pažljivo i temeljito pročitate upute za uporabu. Upute za uporabu sačuvajte radi buduće primjene.
- Molimo Vas da proizvod koristite samo u dodiru s neoštećenom i/ili zaštićenom kožom tijela.
- Proizvod je namijenjen za ublažavanje tegoba kod blažih stadija Hallux Valgusa. Proizvod nije namijenjen liječenju istih, te ne može zamijeniti kiruršku intervenciju.

### Indikacije:

- Hallux Valgus

### Izvedbe:

- Za lijevu nogu
- Za desnu nogu

### Osobine:

- Lako se postavlja.
- Ugodna za uporabu.
- Lako se održava.
- Optimalna mogućnost prilagodbe čičak trakom.

### Sastav proizvoda:

osnovni materijal: 74,3% poliester, 25,7% gumene niti;  
čičak traka: 100% poliamid.

### Vijek uporabe:

5 godina od datuma proizvodnje (označen na deklaraciji) ili godinu dana od početka primjene proizvoda.



### Upute za uporabu

1. Postavite malu omču na palac.
2. Postavite veliku omču na petu.
3. Provucite traku ispod velike omče i zakopčajte čičak traku.
4. Podesite malu omču tako da je koso postavljena na palcu, te poravnajte trake kako Vas ne bi žuljale.

Preporučamo nošenje ortoze za vrijeme spavanja kako obuća ne bi umanjivala učinak ortoze.



### Održavanje proizvoda:



- Dozvoljeno strojno pranje (vrlo blagi postupak) na temperaturi do 40°C.
- Glačanje nije dopušteno.
- Kemijsko čišćenje nije dopušteno.
- Strojno sušenje nije dopušteno.
- Sušiti okomito.

**Zbrinjavanje proizvoda:**

- Molimo Vas da proizvod zbrinete na primjeren način za tekstilne proizvode.

**Zbrinjavanje ambalaže:**

- Molimo Vas da ambalažu zbrinete na primjeren način s obzirom na vrstu ambalaže.



Datum izdavanja uputa za uporabu: 15.04.2021.



**Proizvođač:**  
**OTOS Ortopedska tehnika d.o.o.**  
Vukovarska 1, 31000 Osijek  
Hrvatska, EU  
SRN: HR-MF-000040944  
tel.: +385 31 252 000  
faks: +385 31 252 004  
e-pošta: info@otos.hr  
web: [www.otos.hr](http://www.otos.hr)  
Besplatni info telefon: **0800 94 20**