


Schanzov ovratnik

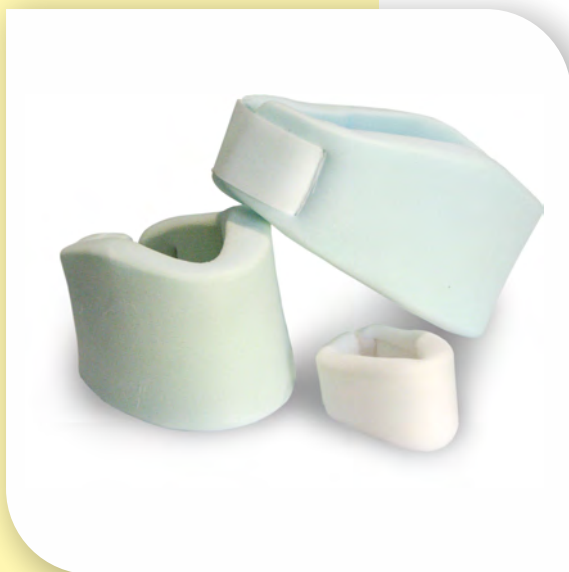

MEDICINSKI PROIZVOD

⚠ UPOZORENJE:

Prije uporabe molimo Vas detaljno pročitajte upute za uporabu.

Vijek uporabe:

5 godina od datuma proizvodnje (označen na deklaraciji) ili godinu dana od početka primjene proizvoda.

⚠ Napomena:

Molimo Vas da ne koristite proizvod ukoliko je oštećen.



Medicinski proizvod klase rizika I. Svaki ozbiljan štetni događaj do kojega je došlo u vezi s proizvodom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice EU.

⚠ Upozorenje:

- Kod stalne uporabe proizvoda može doći do iritacije osjetljive kože.
- Proizvod je namijenjen višekratnoj uporabi od strane jednog korisnika.
- Molimo Vas da ne koristite proizvod ukoliko je oštećen.
- Molimo Vas da proizvod koristite samo u dodiru s neoštećenom i/ili zaštićenom kožom tijela.

Primjena:

- kod cervikalnog sindroma hipermobiliteta
- kod reumatskih promjena vratne kralješnice
- kod preopterećenosti mišića vrata
- kod degenerativnih promjena na vratnoj kralješnici

Osobine:


- Lako se oblači i skida.
- Anatomski oblik s udubljenjem za bradu.
- Ugodan za uporabu.
- Optimalna mogućnost prilagodbe čičak trakom.

Veličine:

Veličina	Opseg vrata	Visina ovratnika
S	38-44 cm	7,5-8 cm
M	42-48 cm	6,5-7 cm
L	42-48 cm	8-8,5 cm
XL	40-46 cm	9,5-10 cm
XXL	46-52 cm	10-10,5 cm

Uzimanje mjere za određivanje veličine:

- A - Opseg vrata (cm)
- B - Visina vrata (cm)

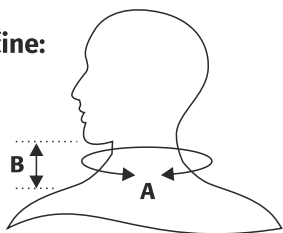

Sastav proizvoda:

punjenje: 100% poliuretan; presvlaka: 80% pamuk, 15% poliamid, 5% elastan; čičak traka: 100% poliamid.


Vijek uporabe:

5 godina od datuma proizvodnje (označen na deklaraciji) ili godinu dana od početka primjene proizvoda.

Upute za uporabu:

- Prilikom postavljanja ortoze obratite pažnju da Vam je vratna kralješnica u pravilnom položaju. Gledajte ispred sebe pazeći da bradu ne spuštate prema dolje, te da ju ne dižete prema gore.
- Postavite ortoza. Čičak traka se postavlja na poleđinu vrata. Brada treba biti postavljena na utor za bradu. Kada je ortoza pravilno postavljena, pričvrstite ju pomoću čičak traka. Ortoza treba biti optimalno stegnuta kako Vam ne bi izazivala nelagodu.
- Prije uporabe ortoze, posavjetujte se o načinu i vremenu nošenja (koliko dugo tijekom dana i koliko dana) ortoze s liječnikom koji Vam je preporučio uporabu.

Održavanje proizvoda:

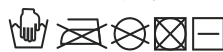

- Ručno pranje na temperaturi do 40°C.
- Glačanje nije dopušteno.
- Kemijsko čišćenje nije dopušteno.
- Strojno sušenje nije dopušteno.
- Sušiti polegnuto.

Zbrinjavanje proizvoda:

- Molimo Vas da proizvod zbrinete na primjeren način za tekstilne proizvode.

Zbrinjavanje ambalaže:

- Molimo Vas da ambalažu zbrinete na primjeren način za s obzirom na vrstu ambalaže.



Datum izdavanja uputa za uporabu: 15.03.2021.

OTOS
ORTOPEDSKA TEHNIKA

Proizvođač:
OTOS Ortopedska tehnika d.o.o.

Vukovarska 1, 31000 Osijek
Hrvatska, EU
SRN: HR-MF-000040944
tel.: +385 31 252 000
faks: +385 31 252 004
e-pošta: info@otos.hr
web: www.otos.hr
Besplatni info telefon: **0800 94 20**