

Trbušni pojas



⚠ UPOZORENJE:

Prije uporabe molimo Vas detaljno pročitajte upute za uporabu.

Vijek uporabe:

5 godina od datuma proizvodnje (označen na deklaraciji) ili godinu dana od početka primjene proizvoda.

⚠ Napomena:

Molimo Vas da ne koristite proizvod ukoliko je oštećen.

Medicinski proizvod klase rizika I. Svaki ozbiljan štetni događaj do kojega je došlo u vezi s proizvodom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice EU.

⚠ Upozorenje:

- Kod stalne uporabe proizvoda može doći do iritacije osjetljive kože.
- Proizvod je namijenjen više-kratnoj uporabi od strane jednog korisnika.
- Molimo Vas da ne koristite proizvod ukoliko je oštećen.
- Molimo Vas da prije uporabe pažljivo i temeljito pročitate upute za uporabu. Upute za uporabu sačuvajte radi buduće primjene.
- Molimo Vas da proizvod koristite samo u dodiru s neoštećenom i/ili zaštićenom kožom tijela.

Primjena:

- kod operacije abdomena
- kod traume prsnog koša
- kod ishijasa korijena živca
- kod loma ili napuknuća rebara
- kod slabosti trbušne ovojnice
- nakon trudnoće
- po preporuci liječnika

Izvedbe:

- Elastični trbušni pojas
- Elastični trbušni pojas za stomu

Osobine:

- lako se oblači i skida
- ravnomjeren raspored pritiska
- lako se održava
- optimalna mogućnost prilagodbe čičak trakom

Veličina	Opseg struka
1	55-65cm
2	65-75cm
3	75-85cm
4	85-95cm
5	95-105cm
6	105-115cm
7	115-125cm

Sastav proizvoda: osnovni materijal: 65,8% poliester, 18,8% viskoza, 15,4% gumene niti; čičak traka: 100% poliamid; ručica za oblačenje: 44% poliester, 33% viskoza, 23% poliamid; zaštita čičak trake: 1. sloj-poliester, 2. sloj-poliuretan, 3. sloj-poliamid; paspul traka: 74,3% poliester, 25,7% gumene niti (ovisno o modelu)

Rok uporabe: 5 godina od datuma proizvodnje (označen na deklaraciji) ili godinu dana od početka primjene proizvoda.

Upute za uporabu (elastični trbušni pojas):

- Pojas je lakše postaviti u ležećem položaju.
- Namjestite pojas.
- Zakopčajte čičak traku.

Upute za uporabu (elastični trbušni pojas s otvorom za stomu):

- Pojas je lakše postaviti u ležećem položaju.
- Namjestite pojas.
- Sa vanjske strane pojasa pričvrstite vrećicu.
- Zakopčajte čičak traku.

Održavanje proizvoda:



- Ručno pranje na temperaturi do 30°C.
- Glačanje nije dopušteno.
- Kemijsko čišćenje nije dopušteno
- Strojno sušenje nije dopušteno.
- Sušiti polegnuto.

Zbrinjavanje proizvoda:

- Molimo Vas da proizvod zbrinete na primjeren način za tekstilne proizvode.

Zbrinjavanje ambalaže:

- Molimo Vas da ambalažu zbrinete na primjeren način s obzirom na vrstu ambalaže.



OTOS
ORTOPEDSKA TEHNIKA

Proizvođač: OTOS Ortopedska tehnika d.o.o.

Vukovarska 1, 31000 Osijek
Hrvatska, EU
SRN: HR-MF-000040944
tel.: +385 31 252 000
faks: +385 31 252 004
e-pošta: info@otos.hr
web: www.otos.hr
Besplatni info telefon: 0800 94 20