

# Utega na gumu

MEDICINSKI PROIZVOD



**⚠ UPOZORENJE:**

Prije uporabe molimo Vas detaljno pročitajte upute za uporabu.

**Vijek uporabe:**

5 godina od datuma proizvodnje (označen na deklaraciji) ili godinu dana od početka primjene proizvoda.

**⚠ Napomena:**

Molimo Vas da ne koristite proizvod ukoliko je oštećen.



Medicinski proizvod klase rizika I. Svaki ozbiljan štetni događaj do kojega je došlo u vezi s proizvodom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice EU.

#### **Upozorenje:**

- Kod stalne uporabe proizvoda može doći do iritacije osjetljive kože.
- Proizvod je namijenjen višekratnoj uporabi od strane jednog korisnika.
- Molimo Vas da ne koristite proizvod ukoliko je oštećen.
- Molimo Vas da prije uporabe pažljivo i temeljito pročitate upute za uporabu. Upute za uporabu sačuvajte radi buduće primjene.
- Molimo Vas da proizvod koristite samo u dodiru s neoštećenom i/ili zaštićenom kožom tijela.

#### **Primjena:**

- kod preponske kile
- po preporuci liječnika

#### **Izvedbe:**

- utega za desnostranu preponsku kilu
- utega za ljevostranu preponsku kilu
- utega za obostranu preponsku kilu

#### **Osobine:**

- Lako se oblači i skida.
- Može se nositi ispod odjeće.
- Elastični materijal.
- Ugodna za nošenje.
- Optimalna mogućnost prilagodbe čičak trakom.

**Sastav proizvoda:** remen: 38,5% pamuk, 23,3% poliester, 20,2% viskoza, 18,0% gumene niti; produžetak pojasa (ovisno o modelu): 100% poliester; pelota: kaučuk; kožni dijelovi: lice boks cjepanik, podstava juneća koža.


**Rok uporabe:** 5 godina od datuma proizvodnje (označen na deklaraciji) ili godinu dana od početka primjene proizvoda.

**Veličina** proizvoda je univerzalna.

#### **Upute za uporabu:**

- Deblji remen obujmity oko struka tako da je pelota okrenuta prema tijelu, a tanji remen da visi niz nogu.
- Remen se prilagođava različitim opsezima struka uz pomoć šnale. Nakon što ste prilagodili remen sebi, zakopčajte šnalu.
- Postavite pelotu na mjesto kile i laganim pritiskom namjestite pelotu.
- Uz pažnju prema namještenoj peloti, provucite tanji remen između nogu i zakopčajte ga provlačeći kukicu na bočnoj šnali kroz rupicu na tanjem remenu.
- Utegu nemojte nositi u ležećem položaju.

#### **Održavanje proizvoda:**

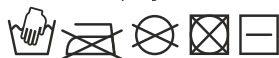

- Ručno pranje u mlakoj vodi.
- Glačanje nije dopušteno.
- Kemijsko čišćenje nije dopušteno.
- Strojno sušenje nije dopušteno.
- Sušiti polegnuto.

#### **Zbrinjavanje proizvoda:**

- Molimo Vas da proizvod zbrinete na primjeren način za tekstilne proizvode.

#### **Zbrinjavanje ambalaže:**

- Molimo Vas da ambalažu zbrinete na primjeren način za papirnatu ambalažu.



Datum izdavanja uputa za uporabu: 31.03.2021.

**OTOS**  
ORTOPEDSKA TEHNIKA

**Proizvođač:**  
**OTOS Ortopedska tehnika d.o.o.**

Vukovarska 1, 31000 Osijek  
Hrvatska, EU  
SRN: HR-MF-000040944  
tel.: +385 31 252 000  
faks: +385 31 252 004  
e-pošta: info@otos.hr  
web: [www.otos.hr](http://www.otos.hr)

Besplatni info telefon: **0800 94 20**